



# Kronen und Brücken Implantat



DENTAL Manufaktur  
Braunschweig  
Korsch & May GmbH

## Der perfekte Ablaufplan.

PRAXIS		LABOR
<p>&gt; 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Erstabformung für Individ.-Löffel (offen / geschlossen angeben)</li> <li>. Abformung Gegenkiefer</li> <li>. Implantat-Parameter angeben</li> <li>. Vorbissnahme</li> <li>. Zahnfarb-Bestimmung</li> <li>. Materialangabe (Metall/Zirkon)</li> </ul>	<p>             6 Werktage         </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Modellherstellung</li> <li>. Herstellung Individ.-Löffel</li> <li>. Bestellung der Abformpfosten (falls gewünscht gerne auch im Vorfeld)</li> </ul>
<p>&gt; 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Individ.-Abformung mit Abformpfosten</li> <li>. Bissregistrierung</li> </ul>	<p>             10 Werktage         </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Modellherstellung</li> <li>. 1. Artikulation</li> <li>. Fertigung Abutment</li> <li>. Herstellung Implantatschlüssel</li> <li>. evtl. Herstellung Bisschablone</li> </ul>
<p>&gt; 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Abutmenteinprobe mit Implantatschlüssel</li> <li>. evtl. Bissregistrierung über Implantatschlüssel</li> </ul>	<p>             10 Werktage         </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 2. Artikulation</li> <li>. evtl. Abutmentkorrektur</li> <li>. Gerüsterstellung</li> <li>. Verblendung</li> <li>. evtl. Farbinfiltration</li> <li>. Glasieren</li> </ul>
<p>&gt; 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Eingliedern</li> </ul>		