



Kombi-ZE

(Teleskope/Geschiebe)

Der perfekte Ablaufplan.



DENTAL Manufaktur
Braunschweig
Korsch & May GmbH

PRAXIS		LABOR
<p>> 1.</p> <ul style="list-style-type: none">. Situationsabformung. Abformung Gegenkiefer. Abformung Präparation. evtl. Vorbissnahme. Zahnfarbe bestimmen. je nach Größe der Versorgung den vorhandenen ZE als Planungsprothese dublieren. Materialangabe (Metall/Zirkon)	<p> 10 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. Modellherstellung. 1. Artikulation. Herstellung Indiv-Löffel für Primärkronen-Abformung. Herstellung Primärkronen
<p>> 2.</p> <ul style="list-style-type: none">. Indiv.-Abformung mit Primärkronen. Vorbissnahme	<p> 5 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. 2. Artikulation. Modellherstellung. Herstellung Bisschabone
<p>> 3.</p> <ul style="list-style-type: none">. Bissregistrierung mit Anzeichnung	<p> 13 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. 3. Artikulation. Herstellung Sekundärteleskope bzw. Geschiebe. Herstellung Modellgussgerüst. Verblendungen. Wachsaufstellung
<p>> 4.</p> <ul style="list-style-type: none">. Gesamteinprobe. evtl. Bissregistrat	<p> 10 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. 4. Artikulatin. evtl. Umstellung/Korrektur zur 2. Anprobe. oder Fertigstellung
<p>> 5.</p> <ul style="list-style-type: none">. Eingliedern		