



Total-Prothese

Der perfekte Ablaufplan.



DENTAL Manufaktur
Braunschweig
Korsch & May GmbH

PRAXIS		LABOR
<p>> 1.</p> <ul style="list-style-type: none">. Abformung für Funktionslöffel. Dublierabformung des alten Zahnersatz (Dublier-Sandwich). Zahnfarbe bestimmen	<p> 6 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. Modellherstellung. Herstellung Funktionslöffel. Herstellung Situationsmodell. Herstellung Messprothese
<p>> 2.</p> <ul style="list-style-type: none">. Funktionsabformung. Vorbissnahme. oder Biss mit Messprothese	<p> 6 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. Herstellung Funktionsmodell. 1. Artikulation. Herstellung Bisschablone
<p>> 3.</p> <ul style="list-style-type: none">. Bissregistrierung mit Anzeichnungen. Angabe Änderungswünsche	<p> 10 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. 2. Artikulation. Aufstellung zur Einprobe
<p>> 4.</p> <ul style="list-style-type: none">. 1. Einprobe der Aufstellung. Bissregistrat zur Kontrolle. oder zur Umstellung. Anzeichnungen für evtl. Umstellung	<p> 5 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. 3. Artikulation. Umstellung, evtl. Neuaufstellung
<p>> 5.</p> <ul style="list-style-type: none">. 2. Einprobe der Aufstellung	<p> 10 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. Fertigstellung. Versiegelung durch Hochglanzpolitur
<p>> 6.</p> <ul style="list-style-type: none">. Eingliederung		